


Das bedeuten die Informationen auf dem Blister

Das Nahtmaterial von FRAGA CHIRURGIE ist durch zwei Blister geschützt: Auf dem ersten Blister, der aus medizinischem Papier ist, stehen für die Rückverfolgbarkeit Informationen zur Herstellung, zum Beispiel das Verfallsdatum der Sterilisierung und die Produktionscharge; auf dem Zweiten befinden sich alle spezifischen Nahtmaterial-Informationen.

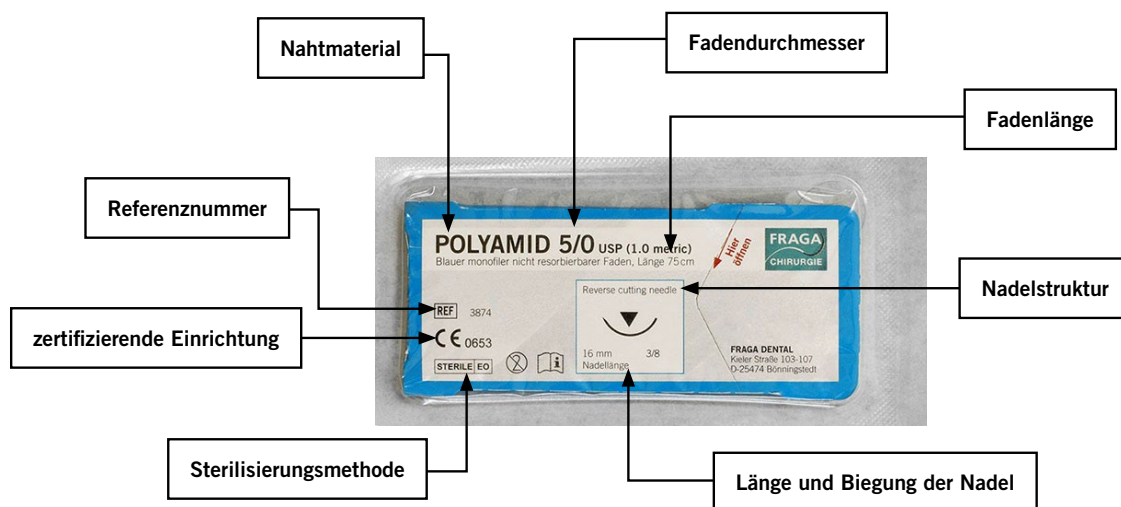

Eigenschaften des Nahtmaterials

Der monofile Faden aus Polyamid ist reißfest und glatt für eine geringe Plaque-Akkumulation, ein leichtes Gleiten durch Gewebe und weniger Gewebereaktionen. Das Nahtmaterial von FRAGA CHIRURGIE verfügt aufgrund der direkten Verbindung mit der Nadel über ein atraumatisches Filament. Es sind die in der Oralchirurgie gebräuchlichen Größen 5/0 und 6/0 erhältlich.

Eigenschaften der Nadel

FRAGA CHIRURGIE bietet für die verschiedenen Arten von Eingriffen jeweils die passende Nadel an. Die Nadeln werden gemäß der Eigenschaften ihrer Spitze eingeteilt:

- ⊕ Die Nadel „round body diamond point“ hat eine viereckige pyramidenförmige Spitze und einen ovalen Rumpf. Diese besondere Form ermöglicht ein gutes Eindringen ins Weichgewebe. Dabei entstehen keine Risswunden und die Nadel dreht sich nicht im Nadelhalter. Diese Nadel eignet sich besonders gut für die Parodontologie und die Implantologie.
- ⊙ Die Nadel „round body“ wird überwiegend in besonders empfindlichen Gewebe eingesetzt. Sie dringt gut ins Gewebe ein, ohne dass Risswunden oder Schäden entstehen.
- ▼ Die Nadel „reverse cutting“ wird auch als „dreieckig“ bezeichnet, da sich ihre Schnittkanten an den Seiten und unten befinden. Diese Nadel dringt mit ihren drei Schnitträndern ohne Schwierigkeiten in das Gewebe ein und eignet sich für nahezu alle Verwendungszwecke.

Die Eindringungsfähigkeit ist sehr gut, die Nadel widerstandsfähig und geeignet für Nähte mit Einbezug des Periosteums und bei Anwesenheit von konsistenten Schleimhäuten.

